

DFV TEST FeLV / FIV

Imunocromatografía doble para la detección independiente en un único dispositivo del antígeno p27 del virus de la leucemia felina (FeLV) y anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia felina (FIV) en suero, plasma o sangre entera de gato.

DESCRIPCIÓN:

Detección independiente en un único dispositivo del antígeno p27 del virus de la leucemia felina (FeLV) y anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia felina (FIV) en 10 minutos. Los gatos infectados con FeLV habitualmente presentan niveles detectables de p27 y la detección de anticuerpos contra FIV son indicativos de la posible presencia de FIV.

MUESTRAS:


- Se recomienda utilizar muestras de suero
- Sangre con anticoagulante (citrato, EDTA o heparina)
- Plasma

No usar muestras con coágulos o muy hemolizadas.

MODO DE EMPLEO:

Abrir el sobre en el momento de realizar el ensayo y mantener el dispositivo en una superficie plana y sin moverlo hasta finalizar el ensayo.

1. Usando la pipeta, tomar muestra hasta la línea marcada (20 µl) y depositarla en el pocillo (S). Repetir el procedimiento para el otro pocillo (S).
2. Añadir todo el contenido de un vial con la solución tampón en un pocillo de muestra (S). Repetir el procedimiento con el otro pocillo (S).
3. Efectuar la lectura a los 10 minutos de que el avance por la membrana sea visible (use reloj).

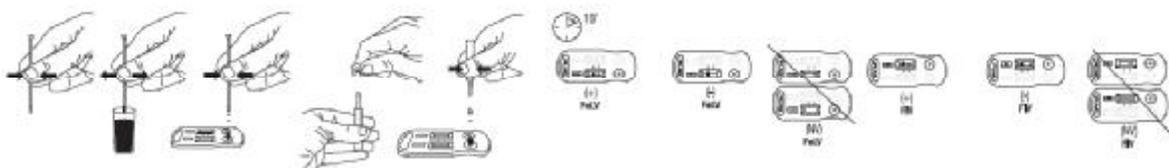

LECTURA DE LOS RESULTADOS:

(Leer independientemente los resultados de cada ensayo):

Positivo (+): Se presenta una banda de color en la zona test (T) y otra en la zona control (C).

Negativo (-): Únicamente se observa una banda de color en la zona control (C).

No válido (NV): Si no aparece una banda de color en la zona control (C) se recomienda repetir el ensayo con un nuevo dispositivo.

CONTENIDO DEL KIT:

- 1 tubo con anticoagulante
- 1 pipeta de plástico
- 2 viales con solución tampón
- 1 sobre que contiene 1 dispositivo

CONSERVACIÓN: Conservar a temperatura ambiente por debajo de 30°C. No necesita refrigeración. No congelar. Proteger de la luz solar directa.

Conservado adecuadamente, el producto es estable como mínimo hasta la fecha de caducidad indicada en el mismo.

PRESENTACIÓN COMERCIAL: Cajas de 1 y 20 kits.

Nº de registro: 0997-RD

