

DFV TEST PARVOVIRUS / CORONAVIRUS

Inmunocromatografía doble para la detección independiente en un único ensayo de antígenos específicos de Parvovirus canino (CPV) y Coronavirus canino (CCV).



DESCRIPCIÓN:


Detección independiente en un único ensayo de antígenos específicos de Parvovirus canino (CPV) y Coronavirus canino (CCV) en 20 minutos. Los perros infectados normalmente excretan niveles detectables de antígenos específicos, aunque la excreción puede ser de forma intermitente.

MUESTRAS: Utilizar muestras fecales de perro.

MODO DE EMPLEO:

Abrir el sobre al momento de realizar el ensayo y mantener el dispositivo en una superficie plana y sin moverlo hasta finalizar el ensayo.

1. Tomar la muestra fecal con el hisopo colector de las heces o bien mediante recolección directa del recto del animal. Insertar el extremo del hisopo con la muestra dentro del tubo con diluyente y agitar enérgicamente 15 segundos dentro del tubo para transferir la muestra.
2. Extraer y situar el dispositivo en una superficie plana y sin moverlo hasta finalizar el ensayo.
3. Usando la pipeta, depositar 4 gotas (120 µl) de diluyente con muestra a cada uno de los dos pocillos circulares, evitando depositar partículas de tamaño grande.
4. Efectuar la lectura, de forma independiente para cada ensayo, a los 20 minutos de que el avance por la membrana sea visible (use reloj).

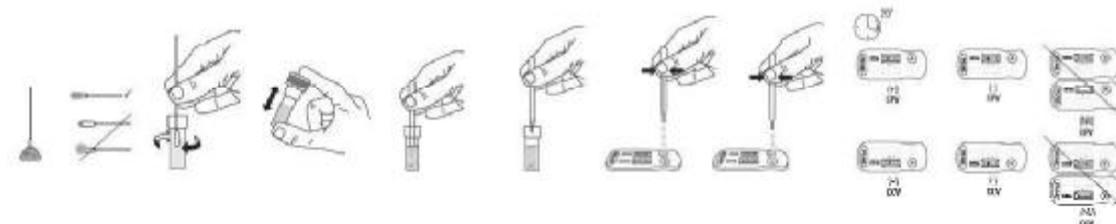

LECTURA DE LOS RESULTADOS:

Positivo (+): Se presenta una banda de color en la zona test (T) y otra en la zona control (C).

Negativo (-): Únicamente se observa una banda de color en la zona control (C).

No válido (NV): Si no aparece una banda de color en la zona control (C) se recomienda repetir el ensayo con un nuevo dispositivo.

CONTENIDO:

- 1 hisopo colector de muestra
- 1 tubo con diluyente
- 1 sobre que contiene: 1 dispositivo y 1 pipeta de plástico.

CONSERVACIÓN: Conservar a temperatura ambiente por debajo de 30°C. No necesita refrigeración. No congelar. Proteger de la luz solar directa. Conservado adecuadamente, el producto es estable como mínimo hasta la fecha de caducidad indicada en el mismo.

PRESENTACIÓN COMERCIAL: Cajas de 1 y 20 kits.

Nº de registro: 0998-RD