

# ANIOSYME X3



DETERGENTE  
PRE-DESINFECTANTE  
DEL INSTRUMENTAL



### Indicaciones:

Limpieza y desinfección del instrumental médico-quirúrgico y del material de endoscopia antes de la esterilización. Limpieza en bandejas ultrasónicas.

### Composición:

Propionato de amonio cuaternario, Digluconato de clorhexidina, tensioactivos no iónicos, complejo enzimático (proteasa, lipasa y amilasa), perfume, colorante, excipientes.

### Modo de empleo:



Solución concentrada para uso profesional.

Se utiliza en remojo diluido al 0,5 %, es decir 25 ml para 5 litros de agua fría o tibia, respetando un tiempo de contacto de 5 min.

Cepillar si es necesario.

Enjuagar cuidadosamente.

Renovar el baño de inmersión al menos una vez al día.

### Precauciones:

Información disponible en la ficha de datos de seguridad y en la etiqueta.

Almacenamiento: de +5°C a +35°C.

Producto sanitario de clase IIb (Directiva 93/42/CEE modificada).

### Presentaciones:

Ref. 4854. - 1 Garrafa de 5 litros (Cajas de 4 unidades)

Ref. 4842. - 1 Envase de 1 litro (Cajas con 12 unidades)



EFICACIA	BACTERICIDA (incl. BMR)	LEVADURICIDA	ACTIVO FRENTE A VIRUS
Tiempo de acción	5 minutos	5 minutos	5 minutos
Normativas	EN 1040 EN 13727 EN 14561	EN 1275 EN 13624 EN 14562	Según EN 14476: PRV (virus modelo HBV), BVDV (virus modelo HCV) Herpesvirus Vaccinia virus HIV-1

La actividad antimicrobiana del producto se recoge en el dossier científico, disponible bajo petición.