

FICHA TÉCNICA



DARODOR SINALDEHYD 2000

DESINFECTANTE PARA MATERIAL CLÍNICO Y ENDOSCOPIOS

Desinfectante no alcohólico para material clínico y endoscopios.

Desinfección rápida de material de instrumental clínico y de laboratorio, específico para material termosensible.



Composición:

- 9,9% Bis-(3-aminopropil)-dodecilamina
- 12% Propionato de didecilmetilpolioxietilamonio 70%
- Tensoactivos, reguladores de pH, agente complejante, solventes, perfume, colorante, csp100

Dosis:

Envase monodosis de 600 ml. Diluir todo el contenido en agua y completar hasta 5 litros. La dosis corresponde al 12%.

Modo de empleo:

1º- Añadir el contenido completo del envase monodosis (600 ml) en una cubeta y completar hasta 5 litros de agua preferiblemente estéril (12%).

2º- Sumergir el material previamente lavado y secado para evitar sobre-diluciones del desinfectante.

3º- Dejar sumergido el material durante el tiempo descrito en la tabla:

EFICACIA: 12%	TIEMPO
Bactericida (EN 14561) Fungicida (EN14562) Micobactericida (EN14563) Tuberculicida (EN14563) Activo frente virus <i>Hepatitis B</i>	20 minutos
Esporicida (EN13704)	60 minutos

4º- Aclarar el material preferiblemente con agua estéril

Usos en:

- Desinfección de productos sanitarios (instrumental médico, endoscopios, equipos de anestesia, material clínico termosensible...).

FICHA TÉCNICA

Eficacia:

EN 14561: Bactericida (*Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterococcus hirae*).

EN14562: Fungicida (*Aspergillus niger*, *Candida albicans*)

EN14563: Micobactericida (*Mycobacterium avium*, *Mycobacterium terrae*)

EN13704: Esporicida (*Bacillus subtilis*)

Activo frente virus *Hepatitis B*

Características químico-físicas:

- Forma: líquido
- Color: azul P-325C – P-327C
- Olor: característico
- Densidad: $1,02 \pm 0,025$ (a 20°C)
- pH : $10 \pm 0,5$ (a 20°C)

Registro:



Presentaciones:

Envase unidosis 600 ml

Precauciones de uso:

- **Uso por personal sanitario**
- **Se recomienda renovar la solución diariamente**
- **Compatibilidad a 25°C con los siguientes materiales: acero, níquel, aluminio, hierro, wolframio, cromo intacto, policarbonato, polietileno, teflón, fibra óptica, caucho y látex**