

FICHA TÉCNICA



LIMOSEPTOL FA

DESINFECTANTE DE SUPERFICIES POR CONTACTO DIRECTO Sin Aldehídos, Fenoles, ni Cloro.

Bactericida, fungicida, activo frente a virus encapsulados, con acción detergente.

Es un producto a base de un amonio cuaternario y una amina terciaria, de olor agradable.

Producto de uso profesional.

Composición:

- Cloruro de didecildimetilamonio5%
- N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina.....2.5%
- Excipientes, c.s.p. 100



Dosificación y Eficacia:

BACTERICIDA – FUNGICIDA – VIRUCIDA (virus encapsulados)

Eficacia	Normas	Dilución	Tiempo de contacto
Bactericida	EN 13697 (<i>P. aeruginosa</i> , <i>E. coli</i> , <i>S. Aureus</i> y <i>E. hirae</i>)	0,5 %	5 min.
Levuricida	EN 13697 (<i>C. albicans</i>)	0,5 %	15 min.
Fungicida	EN 13697 (<i>A. niger</i>)	0,5 %	15 min.
Virucida	DVV/RKI (encapsulados y representativos sangre humana) (<i>Bovine Viral Diarrhea Virus BVDV</i> , <i>HCV</i>) y <i>Vaccinia virus</i>).	2 %	5 min.

Dilución al 0,5%: 50 ml de LIMOSEPTOL FA en 10 L de agua (2 pulsaciones de válvula)

Dilución al 2%: 200 ml de LIMOSEPTOL FA en 10 L de agua (8 pulsaciones de válvula)

Aplicación:

Limpieza y desinfección de superficies de zonas críticas mediante doble cubo, bayeta aséptica y mopa pre-impregnada o pulverizado en baja presión.

Desinfección de sifones de lavabos y tazas de inodoro vertiendo una dosis en los desagües.



JOSE COLLADO, S.A.
Especializados en profilaxis
Costa Rica 35, Local Comercial nº1
Tel. 93 349 61 12 Fax. 93 351 46 40
08027 BARCELONA

FICHA TÉCNICA

Usos en:

- Hospitales: superficies críticas
- Clínicas dentales, consultas, clínicas: superficies críticas
- Laboratorios clínicos y farmacéuticos
- Ambulancias

Características químico-físicas:

- Forma: líquido
- Color: amarillo
- Olor: característico
- Densidad: $0,996 \pm 0,01$
- pH: $11 \pm 0,75$ (20°C)

Registro:

AEMPS 838-DES

Precauciones:

- **No mezclar con detergentes aniónicos**

Presentaciones:

Envase 5L (válvula dosificadora opcional)
Envase 5L estéril con válvula dosificadora

(1 pulsación de válvula corresponde a 25 ml)